



护心云设备使用手册

1. 开启导联设备的开关。
2. 按测试心电图的步骤将心电图设备转备好。
3. 使用 Ipad 的无线网络功能连接至名称为 AXXXXXXX 的网络。
4. 启动护心云软件程序。
5. 点击心电监测功能。
6. 点击左上角按钮，填写测试人信息。
7. 点击测试人名称，并准备测试。
8. 点击右上角红色按钮开始测试。
9. 测试完成后，将无线网络连接至可用外网的网络中进行上传。
10. 上传完成。